



Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe  
Produkcyjno-Handlowe -Usługowo  
**INLAY** Wojciech Kozik  
41-710 Ruda Śląska, ul. Maliszewskiego 8  
tel. +48 (32) 797 42 40 tel./fax +48 (32) 797 42 44



### Sheraform

1. Przy pierwszym użyciu nie należy dodawać wody.
2. Temperatura topnienia nie powinna przekraczać 90/92stopni C , wyższa może masę uszkodzić.
3. Mieszać tak długo aż masa będzie całkowicie płynna inaczej zostaną gródki.
4. Model przed dublowaniem 15 do 30 min nawodnić w letniej wodzie.
5. Temperatura pracy 45 do 50 stopni C
6. Czas wiązania minimum 60 minut
7. Jeśli do chłodzenia agaru w celu przyspieszenia wiązania zostanie użyta zimna woda należy wówczas odczekać aż forma nabierze temperatury pokojowej przed wlewaniem masy osłaniającej.
8. Do ponownego użycia dodać 50 do 100 ml wody.

### Topiąc masę w mikrofalówce

1. Agar pociąć na małe kawałki , zalać wodą i zamieszać a następnie wodę odlać.
2. Do mikrofalówki włożyć przygotowaną masę w **niemetalowym** pojemniku.
3. Załączyć urządzenie na 60 sekund na pełnej mocy.
4. Wyjąć i zamieszać przez ok 30 sekund.
5. Punkty 3 i 4 powtarzać 2 lub 3 razy aż masa osiągnie mniej więcej 84 stopnie C
6. Zalewanie przygotowanego modelu agarem.