



Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe  
Produkcyjno-Handlowe-Usługowo  
**INLAY** Wojciech Kozik  
41-710 Ruda Śląska, ul. Maliszewskiego 8  
NIP: PL6422087469 tel. +48 (32) 797 42 40 tel./fax +48 (32) 797 42 44



## SHERAPORAL

Płyn do utwardzania modeli z mas osłaniających.

Utwardzacz ten został opracowany na podstawie naturalnych komponentów i nie wytwarza żadnych szkodliwych dla organizmu oparów. Produkt nie podlega specjalnej utylizacji.

### **Zastosowanie :**

Preparat ten można stosować do wszystkich mas osłaniających do odlewu szkieletów.

SHERAPORAL należy wlać do plastikowego lub szklanego pojemnika z wieczkiem. Zdublowany model z masy osłaniającej suszyć w 170 – 180° C przez ok 20 minut. Następnie zanurzyć model na 2 sekundy w SHERAPORAL. Po użyciu pojemnik zamknąć. Model postawić pionowo i osuszyć. Jeśli utwardzacz nie wsiąknął w model całkowicie, należy włożyć go jeszcze na 5 minut do pieca. Utwardzony model ostudzić.